



### Proficiat met de aankoop van uw Monty-polsalarm.

Het door u aangeschafte polsalarm is nog niet actief. Om uw Monty-polsalarm te activeren dient u de volgende stappen te ondernemen.

1. Ga naar [mijn.monty.nl](http://mijn.monty.nl)
2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: heeft u ook een Monty-alarmzender aangeschaft dan dient u deze eerst te registreren. Wanneer u deze al geregistreerd heeft kunt u doorgaan met stap 3.

3. Ga naar **ALARMAPPARATEN**.

4. Klik op het **PLUSJE** rechts in het scherm om uw polsalarm toe te voegen.

5. Selecteer in het dropdown menu **POLSALARM**.

6. In het veld **ZENDERNUMMER** vult u het nummer in dat op de achterzijde van uw polsalarm staat. Om dit te kunnen zien dient u de knop los te draaien van de houder. Dit doet u door de knop met de klok mee te draaien en de houder vast te houden.

7. Vul in het veld **LABEL** de naam **POLSALARM** in.

8. Klik op **OPSLAAN**.

Door op **OPSLAAN** te klikken heeft u het polsalarm gekoppeld aan uw Monty-alarmzender. Het polsalarm zal nu binnen 2 uur actief zijn. Test 2 uur na het koppelen of uw Monty-alarmzender daadwerkelijk alarm ontvangt wanneer u de knop van het polsalarm indrukt. Wanneer uw Monty alarmzender in de alarmstatus gaat (rode lampje gaat branden op de Monty


alarm-zender) dan is het apparaat gekoppeld. U kunt het alarm dan annuleren door op de kleine knop te drukken.

### Heeft u vragen?


Kijk op [monty.nl/#faq](http://monty.nl/#faq)



De Monty-alarmzender  
kan ook uitgebreid worden  
met deze extra functies:

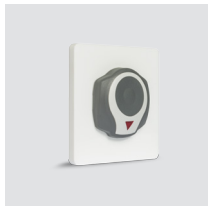

Wandalarm

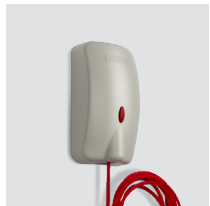

Trekkoordalarm



Rookmelder



Polsalarm  
gebruiksaanwijzing



[www.monty.nl](http://www.monty.nl)