



Proficiat met de aankoop van uw Monty-wandalarm.

Het door u aangeschafte wandalarm is nog niet actief. Om uw Monty-wandalarm te activeren dient u de volgende stappen te ondernemen.

1. Ga naar mijn.monty.nl
2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: heeft u ook een Monty-alarmzender aangeschaft dan dient u deze eerst te registreren. Wanneer u deze al geregistreerd heeft kunt u doorgaan met stap 3.
3. Ga naar **ALARMAPPARATEN**.

4. Klik op het **PLUSJE** rechts in het scherm om uw wandalarm toe te voegen.
5. Selecteer in het dropdown menu **'WANDALARM'**.
6. In het veld **ZENDERNUMMER** vult u het nummer in dat op de achterzijde van uw wandalarm staat.
7. Vul bij **LABEL** de plek in waar u het wandalarm gaat bevestigen, bijvoorbeeld toilet beneden, toilet boven, nachtkastje.
8. Klik op **OPSLAAN**.

Door op **OPSLAAN** te klikken heeft u het wandalarm gekoppeld aan uw Monty-alarmzender. Het wandalarm zal nu binnen 2 uur actief zijn. Test 2 uur na het koppelen of uw Monty-alarmzender daadwerkelijk alarm ontvangt wanneer u op de knop van het wandalarm drukt. Wanneer uw Monty alarmzender in de alarmstatus gaat (rode lampje gaat branden op de Monty alarmzender) dan is het apparaat gekoppeld. U kunt het alarm dan annuleren door op de kleine knop te drukken. U kunt het wandalarm eenvoudig bevestigen met dubbelzijdige tape. Gewoon los neerleggen kan natuurlijk ook.


Heeft u vragen?

Kijk op monty.nl/#faq

De Monty-alarmzender
kan ook uitgebreid worden
met deze extra functies:



Polsalarm

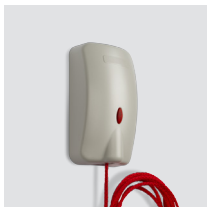

Trekkoordalarm



Rookmelder



Wandalarm
gebruiksaanwijzing



www.monty.nl